

 <p>LP MARIE MARVINGT</p> <p>protocole</p>	<h2 style="color: red; text-decoration: underline;">PREDESINFECTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES (DMR)</h2> <p style="text-align: right;"><i>Activité réalisée par une IBODE suite à un acte de soins</i></p>	
	Zone d'activité	<ul style="list-style-type: none"> - Bloc opératoire - Service de soins
	Objectif	<p><i>Réduire la charge microbienne des DMR par trempage dans un bain de détergent-désinfectant, pour limiter les risques de contamination lors de la manipulation par les agents de stérilisation.</i></p>

Tenue exigée pour l'activité	Matériels	Produits / Consommables
Tenue de base + gants + masque + lunettes de protection + surblouse	<ul style="list-style-type: none"> - Bac de prédésinfection avec panier et couvercle - Brosse - Seringue vide - Fiche de liaison bloc opératoire/STE 	Détergent – Désinfectant (ex : Hexanios G+R)

Mode opératoire :

➤ Préparatifs :

- Préparer une solution froide ou tiède de détergent- désinfectant dans le bac équipé d'un panier

➤ Prédésinfection des DMR :

- Brosser les DMR très chargés de souillures organiques
- Irriguer les tubes creux avec une seringue remplie de solution prédésinfectante
- Ouvrir les ciseaux et pinces
- Immerger complètement les DMR démontés ou ouverts
- Fermer le bac avec le couvercle
- Déclencher le minuteur - temps de contact 15 min minimum

➤ Traçabilité :

- Relever sur la fiche de suivi :
 - la date et l'heure de départ
 - le nom de l'opérateur

➤ Transport des DMR prédésinfectés vers le Plateau de Stérilisation :

- Rincer les DMR après le temps de contact
- Transporter-les dans le bac vidé muni d'un couvercle, avec la fiche de suivi

➤ Bionettoyage des surfaces selon le protocole :

- Bionettoyage manuel par pulvérisation

Risques	Prévention	Critères de conformité de la procédure
Risque biologique Risque mécanique : risque de coupure... Risque chimique	Port de gants Port de masque : éviter les inhalations de produits et projections	Dilution exacte du produit Hexanios G+R DMR ouverts ou démontés Temps de contact, minimum 15 min, ne pas excéder 24 h Fiche de traçabilité complétée

