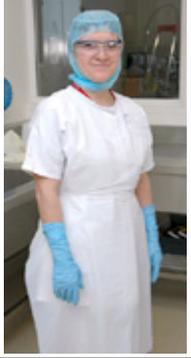


 <p>LP MARIE MARVINGT</p> <p>Protocole</p>	<p><u>RECEPTION, CONTROLE ET TRI</u></p> <p><u>DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES (DMR)</u></p>	
	Zone d'activité	Zone de réception (en dépression) en zone de lavage
	Objectif	<i>S'assurer de la présence de tous les DMR mentionnés sur la fiche de liaison, les contrôler, les trier en les dirigeant vers la filière de lavage adaptée et prendre en charge les conteneurs et boîtes de transport.</i>

Tenue exigée pour l'activité	Matériels	Produits / Consommables
Tenue de base + gants à manchettes + masque + lunettes de protection + tablier en polyéthylène (+ Charlotte)	 - 4 Paniers de tri	

Mode opératoire :

- Sortir les boites des chariots de transport
- Ouvrir les boites ou les conteneurs
- Sortir les paniers de DMR
- Prendre connaissance de la fiche de liaison bloc-stérilisation
- Vérifier la bonne adéquation entre les DM et la liste de DM sur la fiche de liaison et leur état en les sortant un à un en vérifiant l'ouverture et le démontage des instruments
- Répartir les DMR ouverts dans les 4 paniers et les diriger en fonction de la zone de lavage :
 - les DMR destinés au lavage manuel : instruments de microchirurgie, non immergeables (moteur)
 - les DMR destinés au bac à ultra-sons : creux, tubulaires, formes complexes, instruments à mors...
 - les DMR destinés au lavage dans le laveur-désinfecteur d'instruments (LDI) : dispositifs immergeables, thermorésistants, résistants aux produits détergents
 - les DMR souillés à retraiter
- Compléter les fiches de liaison des DMR pour assurer la traçabilité
- Bionettoyage manuel ou au LDI du ou des bac(s) de prédésinfection
- Bionettoyage des surfaces selon la fiche de poste : bionettoyage manuel par pulvérisation

L'agent qui réceptionne un DM non référencé dans la liste doit le mettre en attente et informer l'encadrement : le DM ne peut pas être traité si le service de stérilisation ne dispose pas des instructions d'entretien figurant dans la notice fournie par le fabricant.

Un DM à usage unique sera systématiquement refusé et éliminé dans la filière DASRI		logo signifiant DMUU
--	---	----------------------



Risques	Prévention	Critères de conformité de la procédure
Risque microbiologique : les DM ne sont que prédésinfectés ! Risque lié à l'activité physique : TMS, mal de dos.... certains conteneurs pèsent jusque 20kg ! Risque mécanique : risque de coupure... Risque chimique	Poste de travail à hauteur adaptée Port de gants Port de masque : éviter les inhalations de produits	DMR prédésinfectés et rincés DMR triés selon les modalités de lavage Fiche de liaison des DMR complétées

