



MARIE MARVINGT

Protocole

CHARGEMENT ET LAVAGE DES DMR AU LAVEUR-DESINFECTEUR

Zone d'activité	Zone de lavage
Objectif	<i>Disposer les DMR de façon à optimiser leur lavage et désinfection au laveur-désinfecteur et lancer le cycle adéquat.</i>

Tenue exigée pour l'activité	Matériels	Produits/Consommables
pantalon - tunique - crocks - tablier jetable - charlotte - gants à usage unique (- masque - lunettes de sécurité)	<ul style="list-style-type: none"> - Plaques d'identification du service d'origine des DM - Paniers de lavage de différentes tailles - Paniers « boule de thé » - Supports avec injecteurs - laveur-désinfecteur - Etiquettes « PRION » 	- Produits de lavage des DM : détergent basique + neutralisation (+ activateur de séchage)

Mode opératoire :

➤ Préparation des paniers :

- Prendre connaissance du risque Prion éventuel (fiche de liaison bloc-stérilisation)
- Prendre des paniers vides et les identifier avec des étiquettes correspondant au bloc propriétaire des DMR
- Identifier le panier avec une étiquette mentionnant ou non le risque Prion



➤ Répartition des DMR dans les paniers :

La disposition des objets vise à éviter les « zones d'ombres » qui empêcheraient le contact avec la solution de lavage :

- ouvrir largement les instruments articulés,
- démonter toutes les parties amovibles (attention à disposer les vis et petits accessoires dans des petits paniers avec couvercles prévus à cet effet),
- ne pas surcharger les paniers,
- étudier la disposition des instruments pour éviter les zones d'ombre,
- disposer les cupules ou objets creux ouverture vers le bas,
- utiliser des supports avec injecteurs pour les tuyaux ou instruments creux.



Rq : Si les instruments sont très souillés, il faut les brosser ou les écouvillonner avant de les mettre en machine.

➤ Vérification du LDI : nettoyer les filtres et vérifier le niveau des produits

➤ Chargement des paniers :

Les supports sont munis de roulettes pour faciliter le chargement et le déchargement de la machine.

Les paniers sont disposés sur le support en veillant à la libre rotation des bras. Les paniers sont placés sur le support, les objets les plus lourds sont placés en bas, les cupules, plateaux et objets creux disposés avec l'ouverture vers le bas pour éviter la rétention d'eau.

Il existe des supports spécifiques pour les autres catégories de dispositifs. Ils permettent l'irrigation des tuyaux ou instruments creux.



➤ Programmation : sélectionner le programme et lancer le cycle

➤ Traçabilité :

- Enregistrer les paniers constituant le support
- Enregistrer le cycle choisi (prion ou non)



Risques	Prévention	Critères de conformité de la procédure
Risque microbiologique Risque mécanique : risque de coupure... Risque chimique	Port de gants	<ul style="list-style-type: none"> - Paniers identifiés et non surchargés - DM ouverts et/ou démontés et bien disposés - Cycle de lavage bien choisi

